

DiaFlex

사용목적

- ◆ 체강이나 상처에 약액을 주입하고 뽑아내는 데 사용한다.

사용방법

가. 사용 전 준비사항

1. 개봉 전 제품의 이상 유무 및 손상, 이물질이 있는지 확인한다.
2. 사용 전 사용설명서 및 주의사항, 표시사항을 확인한다.

나. 사용방법 및 조작순서

1. 사용 전 실리콘 캡을 주사기와 분리한다.
2. 주사기에 준비된 세정액 또는 약액을 밀대로 잡아 당겨 외통에 주입한다.
3. 일회용 팁을 끼운다.
4. 세정액 또는 약액을 주입하고자 하는 부위에 밀대를 밀어 주입한다.

다. 사용 후 보관 및 관리방법

1. 본 제품의 일회용 팁은 일회용이므로, 재사용을 금한다.
2. 의료용 폐기물로 폐기한다.
3. 화기를 가까이 하지 않는다.
4. 직사광선이 닿지 않는 곳에 보관한다.

사용시 주의사항

1. 사용 후 주사기는 내부의 약제 또는 이물질이 남지 않도록 증류수로 세척한 후 소독용 알코올을 이용하여 소독한다.
2. 세척 및 소독시에는 면으로 된 천이나 거즈를 이용한다.
3. 세척 및 소독이 완료된 주사기는 완전히 건조시킨 후 청결한 곳에 보관한다.
4. 동봉된 일회용 팁은 재사용 금지이므로, 재사용을 금한다.
5. 본 제품의 사용 시, 당사에서 제공한 제품을 임의로 변경하거나 다른 용도로 사용을 금한다.

부작용 보고 관련 문의처

한국의료기기안전정보원 080-080-4183

제조사 : (주)다이하덴트
충북 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명 4로 16
전화 : (043)266-2315
팩스 : (043)262-8658
이메일 : diadent@diadent.co.kr
홈페이지 : www.diadent.co.kr

Copyright : May.29.2025 [IFU : Diaflex(Rev.2)]